

picături oftalmice, soluție, fără conservanți

1. Ce este OCU^hyl^C și la ce se folosește

OCU^hyl^C sunt picături oftalmice, soluție, fără conservanți, ce conțin hialuronat de sodiu și extract de gălbenele. Au efect umidifiant, calmant și lubrefiant. Datorită conținutului de hialuronat de sodiu (moleculă ce se regăsește în mod natural în structurile ochiului uman, dar și în alte organe) picăturile asigură o calmare eficientă și un confort de durată împotriva senzațiilor de uscăciune și arsură a ochilor. Extractul de gălbenele are efect antiinflamator, de protecție și regenerare a epitelului ocular.

OCU^hyl^C este folosit în situații de reducere a secreției lacrimale pentru umidifierea, protecția și lubrefierea suprafeței oculare și în situații asociate cu sindromul de ochi uscat:

- keratoconjunctivita sicca (insuficiență lacrimală, senzație de arsură, senzație de asprime, fotofobie, senzație de corp strain în ochi)
- leziuni corneene, eroziuni corneene, intervenții chirurgicale la nivelul corneei
- modificări hormonale (menopauză)
- folosirea îndelungată a calculatorului, șofatul pe distanțe lungi, zborurile lungi
- mediu cu aer condiționat, vânt, frig, căldură uscată, praf, fum, aer poluat

OCU^hyl^C este utilizat ca tratament suportiv în situațiile de reducere a filmului lacrimal, pentru îmbunătățirea filmului lacrimal al ochiului. Este de asemenea utilizat în situații care asociază senzația de ochi uscat, oboseală, arsură, senzația de corp străin în ochi.

OCU^hyl^C nu conține conservanți, așadar este un produs ideal pentru purtătorii de lentile de contact și pentru persoanele cu ochi sensibili.

OCU^hyl^C poate fi folosit de adulți, de adolescenți și de copii.

2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza OCU^hyl^C

Nu utilizați OCU^hyl^C dacă sunteți alergic la oricare dintre substanțele conținute în acest produs.

Dacă se aplică simultan și alte picături sau geluri oftalmice, este recomandat să se mențină un interval de minim 5 minute între aplicări.

3. Cum se folosește OCU^hyl^C


Uzual se administrează o picătură de 1-3 ori pe zi, dar poate fi administrat și mai frecvent. OCU^hyl^C poate fi folosit pe termen lung.

Purtătorii de lentile de contact


OCU^hyl^C se poate aplica în timpul purtării lentilelor de contact.

Precauții înaintea administrării

1. Spălați-vă pe mâini și așezați-vă într-o poziție confortabilă.
2. Desfaceți capacul flaconului.

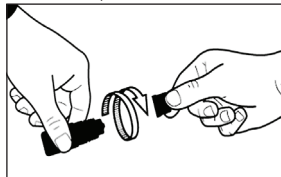


3. Țineți flaconul între degetul mare și celelalte degete, cu picurătorul în jos.
4. Înainte de prima utilizare, este recomandat ca prin presarea ușoară a flaconului să eliberați prima picătură în exteriorul ochiului. Apăsarea puternică și neconsecventă poate cauza eliberarea unui jet de soluție.
5. Folosiți degetul pentru a trage în jos de pleoapa inferioară a ochiului afectat.

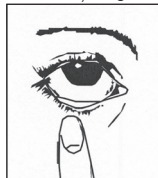

6. Plasați vârful picurătorului aproape de ochi, dar fără a atinge ochiul sau regiunile adiacente ochiului.
7. Apăsați ușor pe flacon astfel încât o singură picătură să ajungă în ochi. Eliberați apoi pleoapa inferioară și închideți încet ochiul, astfel încât OCU^hyl^C să se distribuie uniform pe suprafața ochiului.

Pentru următoarea picătură, permiteți flaconului să tragă aer pentru a reveni la forma inițială, apoi continuați aplicarea așa cum v-a fost recomandat. Luați în considerare că este posibil să dureze câteva secunde din momentul când apăsați pe flacon până iese prima picătură. Flaconul nu trebuie apăsat prea tare.

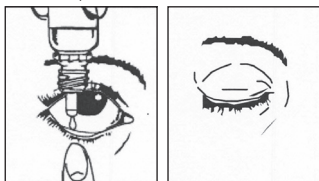

8. Dacă este nevoie, repetați procedura și pentru al doilea ochi.



9. După utilizare, flaconul trebuie scuturat o dată în jos, fără a atinge vârful picurătorului, pentru a îndepărta lichidul rămas pe vârf. Această acțiune este necesară pentru a asigura sterilitatea soluției și o eliberare mai ușoară a picăturilor la următoarea utilizare.

10. Imediat după utilizare închideți bine capacul flaconului.

4. Care sunt posibilele efecte secundare

Rareori, imediat după aplicare, poate să apară o senzație temporară de arsură ușoară sau o reacție de hipersensibilitate la unul din componentele produsului. În cazul apariției acestor efecte adverse sau altor reacții neobișnuite, adresați-vă medicului sau farmacistului.

5. Ce conține OCU^{hyf}C

Hialuronat de sodiu 1,2 mg/ml, extract de gălbenele, clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de magneziu hexahidrat, acetat de sodiu trihidrat, citrat de sodiu, apă purificată.

6. Cum se păstrează OCU^{hyf}C și alte informații

Păstrați produsul în ambalajul original la temperaturi până la 25 °C.

Nu refrigerați sau congelați.

Nu lăsați la îndemâna și vederea copiilor.

Produsul nu trebuie utilizat după data de expirare înscrisă pe etichetă sau ambalaj în dreptul semnului clepsidrei. Data expirării se referă la ultima zi din luna respectivă.

Nu utilizați OCU^{hyf}C mai mult de 3 luni de la prima deschidere a flaconului.

Ambalaj: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovacia

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Ultima actualizare a prospectului: Aprilie 2020